

schülke -†



Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků

**Rychlý
účinek**

mikroqid® AF liquid

Naše Plus

- Okamžitě k použití
- Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
- Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
- Dobrá materiálová snášenlivost
- Nezanechává šmouhy

Oblast použití

mikroqid® AF liquid se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné pro lesklé povrchy a oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např:

- Povrchy v blízkosti pacientů
- Kontaktní plochy
- Vyšetřovny
- Operační stoly a okolní povrchy
- Zdravotnické prostředky

Účinnost

Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

mikroqid® AF liquid se dále neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Povrch důkladně smočte roztokem a nechte působit po dobu 1 minuty, případně přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou.

CE 0297



mikrozid[®] AF liquid

Složení

100 g roztoku mikrozid[®] AF liquid obsahuje následující aktivní látky:

- 35 g Propan-1-ol
- 25 g Ethanol

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	nestanoveny
Forma	kapalný
Hustota	cca. 0,89 g/cm ³ / 20 °C
pH	Nevztahuje se
Zápalná teplota	27 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické přístroje použijte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zápalu. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy).

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Mikrozid AF liquid 250 ml, rozprašovač	10/Karton	109160
Mikrozid AF liquid 1 l	10/Karton	109304
Mikrozid AF liquid 10 l	1/Kanistr	109177
mikrozid AF liquid 5 l	1/Kanistr	109166

Příslušenství

Příslušenství	Číslo výrobku
Dávkovací pumpa pro kanistry 5 / 10 l	117101
Klíč na 5l a 10l kanistr	135810
Kohout výpustný pro kanistry 5 / 10 l	135501
Plastová odměrka S&M na 50 ml	136102
Rozprašovač na 500 ml a 1 l láhve	180124

Související přípravky

- desprej[®]
- mikrozid[®] AF wipes
- mikrozid[®] sensitive liquid

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. D-150-10023



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com